


Salli & Catti

ADVAN
stapler skórný do zakładania szwów
na rany powierzchowne

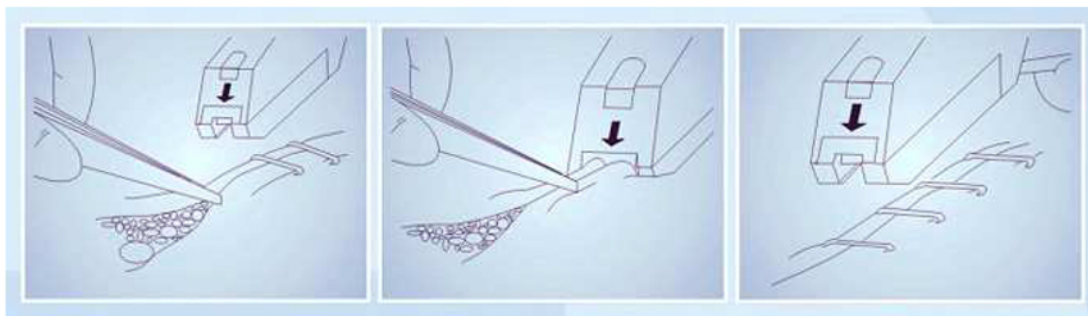

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- zbliżyć dwie strony nacięcia skórnoego za pomocą pęsety,
- zacisnąć tkankę pęsetą tak aby obydwie strony równolegle przylegały do siebie,
- upewnić się, że dolna część staplera jest ustawiona odpowiednim rogiem do środka rozcięcia, a spinka znajduje się pionowo do podłużnej osi rany,
- przyłożyć stapler do rany aby strzałka z przodu staplera znajdowała się po środku cięcia,
- **UWAGA:** nie należy przyciskać staplera mocno do rany, gdyż może to spowodować trudności przy usuwaniu zszywek,
- ścisnąć uchwyt i nie puszczać aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia,
- odsunąć stapler od miejsca zszywania i przesunąć do następnego miejsca,
- maksymalna siła zszywania nie powinna przekroczyć 55 N.

OSTRZEŻENIA:

- *zawsze, gdy jest taka możliwość zwróć się o pomoc do lekarza weterynarii.*
- stapler skórný jest przeznaczony do szycia *ran skórnych*, zabrania się używania staplera skórnego jeśli odległość między rozcięciem, a ważnymi organami wynosi mniej niż 5mm (np.: gałki oczne, jama brzuszna itp.)
- jeśli warstwa podskórna pod rozcięciem jest za cienka zaleca się przeprowadzenie najpierw zszywania warstwy podskórnej, a następnie zszywania skóry przy użyciu staplera.
- odległość między zszywkami powinna wynosić od 5 mm do 10 mm. Proszę używać specjalnego urządzenia do usuwania zszywek, które powinny być usunięte po 7-10 dniach jeżeli zalecenia lekarza nie są inne.
- Nie używać po upływie terminu przydatności.